

INSTRUKCJA

Fleximove - Maxinosze RO 4012 (110 x 53cm) RO 4016 (150x53cm)








Zalecane użycie: Obracanie w łóżku. Przemieszczanie w górę łóżka. Przemieszczanie z łóżka na wózek prysznicowy. Podnoszenie z podłogi.



Pranie: Przed praniem usunąć wzmocnienie i wyściółkę. Powierzchnie przecierać środkami dezynfekującymi. Pokrycie prać bez środków zmiękczejących, bez chloru i wybielaczy. Max temperatura prania i suszenia 70°C.

Maksymalny ciężar: 150 kg

Stosowanie: Ułóż pacjenta na boku. Wsuń nosze (RO 4012) z uchwytami zawiniętymi pod spód. Połóż pacjenta na plecach na noszach. Wyciągnij uchwyty spod noszy.

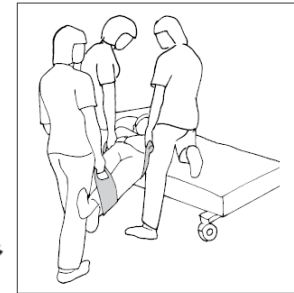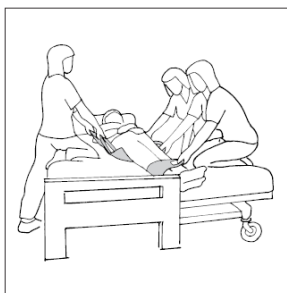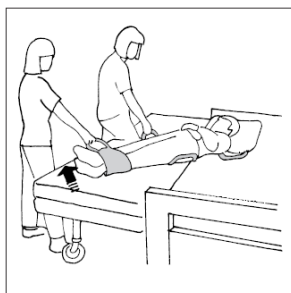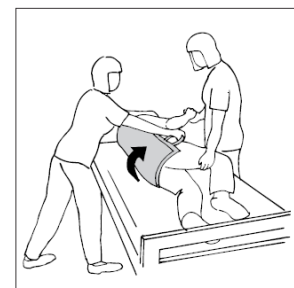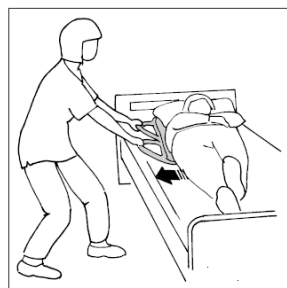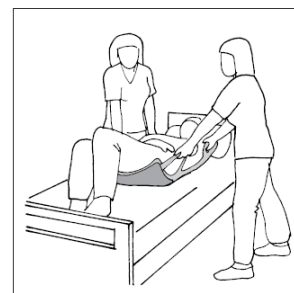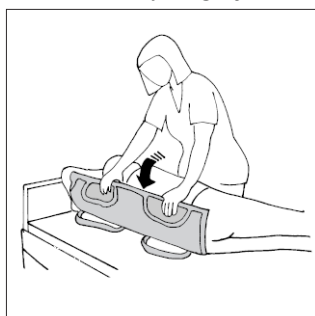

ScanRehab
rehabilitacja i pielęgnacja

ul. Św. Anny 5, 31-008 Kraków

Tel: + 48 (012) 421-71-20, Fax : +48 (12) 421-72-91

www.scanrehab.pl, e-mail biuro@scanrehab.pl