

INSTRUKCJA

QuickMove- Bezpieczne i pewne urządzenie do pozycjonowania i przemieszczania



Max: 170 kg/375 lbs



Zalecane użycie: QuickMove służy jako aktywna pomoc w przemieszczaniu oraz transportowaniu pacjentów. Zaprojektowane dla pacjentów ze słabą równowagą i osłabionymi kończynami dolnymi. QuickMove jest idealną pomocą dla pacjentów, którzy mogą się podnieść do pozycji prostej lub półprostej w celu przemieszczenia. QuickMove może być również używany jako urządzenie do przemieszczania pacjentów z łóżka na krzesło/wózek/toaletę.




Opis części:

1. Siedzisko
2. Regulacja głębokości podparcia kolan
3. Regulacja pochylenia siedziska
4. Regulacja głębokości siedziska
5. Regulacja wysokości podparcia kolan.
6. Dźwignia regulacji rozstawu nóg
7. 2x kółka z hamulcami z tyłu
8. Demontowalna podstawka na stopy.

QuickMove nie jest przeznaczony do przemieszczania na dughich odcinkach. Może być używany tylko na płaskich podłogach.

QuickMove może być użyty dla pacjentów, którzy są w stanie:

- utrzymać swój ciężar stojąc
- wstać i utrzymać równowagę (z podparciem)
- trzymać się uchwytów
- rozumieć wydawane im polecenia

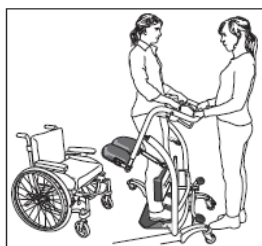


Sprawdzenie zdolności pacjenta do wstawania.

QuickMove jest idealny w sytuacji gdy nie ma pewności czy pacjent jest w stanie wstać z pozycji siedzącej do pozycji stojącej.

Ćwiczenie zdolności pacjenta do wstawania.


QuickMove może być używany do ćwiczenia stania, wstawania oraz siadania . W celu badania postępu użyj zegarka lub stopera aby mierzyć czas pacjenta.

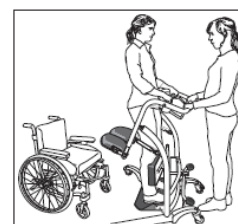

Poprawianie pozycji w wózku.

Jeżeli pacjent zsunie się w wózku inwalidzkim, QuickMove może być użyty aby zapobiec dalszemu zsuwaniu się. W tym celu odsuń podstawki pod stopy na bok, wjedź QuickMove przed wózek. Pacjent kładzie stopy na urządzeniu, łapie uchwyty, pochyla się w przód i podnosi z wózka. Opiekun wsuwa pacjenta na urządzeniu głębiej na wózek.

Używanie QuickMove

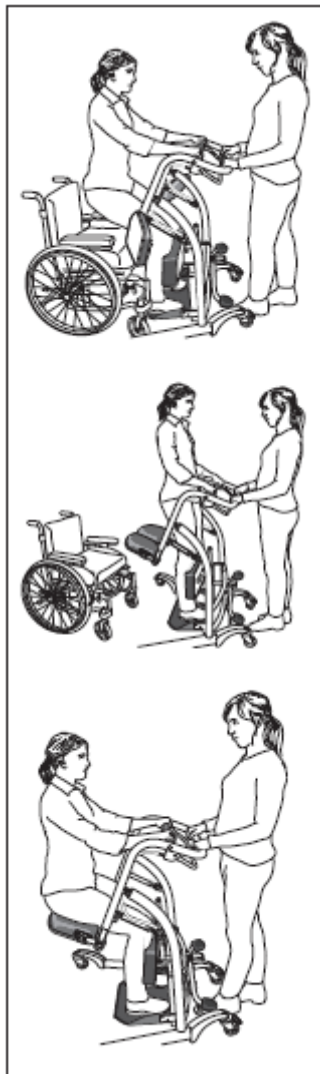

Umieść QuickMove tak blisko pacjenta jak to możliwe i poproś pacjenta o postawienie stóp na podstawce na stopy. Ustaw wysokość i głębokość podparcia na kolana oraz głębokość siedzenia, jeżeli potrzeba.

Pacjent może teraz chwycić miękkie uchwyty i podnieść się do pozycji stojącej.

Kiedy pacjent jest w pozycji stojącej, opiekun obniża siedzenia za pacjentem.

Dzięki temu pacjent będzie mógł usiąść podczas przemieszczania. Dla optymalnego komfortu siedzenia, opiekun może regulować kąt pochylenia siedzenia. Funkcja ta ułatwia stanie, ponieważ wyżej umieszczone siedzenie pozwala pacjentowi mieć bardziej wyprostowane nogi.

Czyszczenie: Używać miękkiej szmatki i delikatnego środka czyszczącego jak płyn do mycia naczyń lub szampon samochodowy. Nie używać rozpuszczalników. W celu dezynfekcji używać alkoholu 70%.

GWARANCJA: 24 miesiące od daty zakupu. Wszelkie sprawy gwarancyjne pod numerem 12 421 71 20.

ScanRehab
rehabilitacja i pielęgnacja

ul. Św. Anny 5, 31-008 Kraków

Tel: + 48 (012) 421-71-20, Fax : +48 (12) 421-72-91

www.scanrehab.pl, e-mail biuro@scanrehab.pl