

INSTRUKCJA

ReTurn7100- Bezpieczne i aktywne urządzenie do pozycjonowania i przemieszczania



SWL: 150 kg/330 lbs



Zalecane użycie: wewnątrz budynków . Do przemieszczania na krótszych odcinkach pomiędzy wózkiem inwalidzkim i łóżkiem/wózkiem i toaletą/wózkiem i krzesłem/fotelem. Może służyć również do poprawiania pozycji na wózku. Zaprojektowane dla łatwego używania i manewrowania przy ograniczonej ilości miejsca.

ReTurn 7100 przeznaczony jest do przemieszczania na krótszych odcinkach. Może być używany tylko na płaskich podłogach. Opiekun musi zawsze, z użyciem odpowiedniej siły, w bezpieczny sposób przytrzymać urządzenie w momencie gdy pacjent wstaje, siada i podczas przemieszczania.



1




2

ReTurn 7100 może być użyty dla pacjentów, którzy są w stanie:

- stać na własnych nogach podpierając się
- utrzymać równowagę (z podparciem)
- trzymać się uchwytów
- rozumieć wydawane im polecenia

Ułożenie stóp

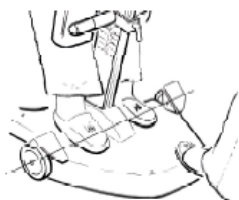

Stopy pacjenta ustawiamy jedną po lewej stronie urządzenia, drugą po prawej stronie, zgodnie z zaznaczonymi miejscami na urządzeniu.

Ciężar pacjenta musi być ustawiony w centralnym miejscu urządzenia, między kołami. Pacjent musi być w pozycji stojącej.



Hamulce

Przy każdym z kół jest hamulec. Żeby zahamować, stopą wciśnij hamulec do pozycji poziomej. Aby zwolnić hamulec, wróć go do pozycji pochylonej.



Podparcie nóg.

Ustaw podparcia nóg tak, aby ich górne krawędzie były 3 centymetry poniżej kolan. Dokręć pokrętko po ustawieniu odpowiedniej wysokości.


Przemieszczanie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki.

Pacjent kładzie stopy na urządzeniu, łapie uchwyty, przechyla się w przód i podnosi z łóżka.



Opiekun wycofuje urządzenie i kieruje nim w stronę wózka.

Ustawia urządzenie w takiej odległości od wózka, aby pacjent mógł prawidłowo na nim usiąść. Następnie stopą dociska urządzenie do podłogi, a pacjent siada na wózku.

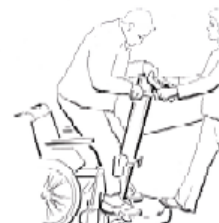

Przemieszczanie pacjenta na toaletę/wózek prysznicowy.

Przy przemieszczaniu na toaletę należy zachować odpowiednią ilość miejsca do pomocy pacjentowi przy rozbieraniu. Tył urządzenia ReTurn ma specjalne wycięcie, aby można było Biłsko podjechać do toalety i ułatwić pacjentowi zajęcie dobrej pozycji na toalecie.



Poprawianie pozycji w wózku.

Jeżeli pacjent zsunie się w wózku inwalidzkim, ReTurn7100 może być użyty aby zapobiec dalszemu zsuwaniu się. W tym celu odsuń podstawki pod stopy na bok, wjedź ReTurn przed wózek. Pacjent kładzie stopy na urządzeniu, łapie uchwyty, pochyla się w przód i podnosi z wózka. Opiekun wsuwa pacjenta na urządzeniu głębiej na wózek.



Czyszczenie: Używać miękkiej szmatki i delikatnego środka czyszczącego jak płyn do mycia naczyń lub szampon samochodowy. Nie używać rozpuszczalników. W celu dezynfekcji używać alkoholu 70%.

GWARANCJA: 24 miesiące od daty zakupu. Wszelkie sprawy gwarancyjne pod numerem 12 421 71 20.

ScanRehab
rehabilitacja i pielęgnacja

ul. Św. Anny 5, 31-008 Kraków
Tel: + 48 (012) 421-71-20, Fax : +48 (12) 421-72-91
www.scanrehab.pl, e-mail biuro@scanrehab.pl